

**E02971-01/-02****Injektionsadapter für Knochen-
zementapplikator****Adapter for injection for bone
cement applicator**

E02971-01

E02971-02

**Verwendung der Injektions-
adapter für Knochenzement-
applikator**

Die Injektionsadapter, offen, für Knochenzementapplikator (E02971-01) und Injektionsadapter, perkutan, für Knochenzementapplikator (E02971-02) können alternativ zu Injektionsadapter, offen (CS 3850-01) und Injektionsadapter, perkutan (CS 3850-02) angewendet werden.

Die Applikation des Zementes erfolgt über den Knochenzementapplikator (CS 6601-07). Zunächst wird dieser mit Zement gefüllt und in den Injektionsadapter für Knochenzementapplikator (E02971-xx) eingeführt.

Dann wird mit Hilfe des Stößels der Zement durch das Schraubenunterteil in den Wirbelkörper injiziert.

**Use of the adapter for injection
for bone cement applicator**

The adapter for injection, open (E02971-01) and adapter for injection, percutaneous (E02971-02) can be used alternatively for adapter for injection, open (CS 3850-01) and adapter for injection, percutaneous (CS 3850-02).

The cement is applied through the bone cement applicator (CS 6601-07). First the bone cement applicator (CS 6601-07) is filled with cement and inserted into the adapter for injection for bone cement applicator (E02971-xx).

With the aid of the tamper the cement is then injected through the screw base into the vertebral body.



CS 6601-07

Weitere Informationen finden Sie in der OP-Technik des uCentum Systems.
Further information please find in the Surgical Technique of uCentum.

